

产品使用说明书

【产品名称】：拔髓针

【型号规格】：见标签

【产品性能及主要结构】：由手柄和针体组成，对根管内部进行处理的针形器械。可重复使用。

【适用范围】：用于牙体牙髓的治疗。

【禁忌症】：对本产品过敏者禁止使用。

【使用方法】：根据其预期用途，选择最合适的型号，并将其用于牙髓拔除。

【注意事项】：

- 1、为防止感染，每次使用前请先对产品进行灭菌，确保灭菌完成后方可使用。灭菌方法：压力蒸汽灭菌，灭菌温度：134℃，最短灭菌时间:3min。
- 2、根据不同情况选择最合适的型号，并遵循一般方法。
- 3、使用前，确保口腔外的器械无变形、划痕和裂纹。
- 4、如果产品头部较细、较长或较大，则有可能断裂或扭曲。因此，一定要避免使用不合理的角度和过大的压力。
- 5、佩戴橡皮障等，避免意外误吞和掉落。
- 6、除上述所列用途外，请勿将本仪器用于任何用途。
- 7、仅供牙科医生使用。
- 8、本产品处置时应作为医疗废物处理。
- 9、如果产品损坏或被污染，应进行处理。
- 10、使用后，用医用清洁剂和毛刷清洗，然后冲洗掉附着的体液和人体组织等异物。
- 11、超声波清洗机清洗时，请将产品放置在支架上，以避免切割部分的老化。
- 12、使用本产品时要特别小心，避免因其拥有锋利的边缘部分而刺伤手指。
- 13、本品如果长期浸泡在NaClO、EDTA等溶剂中，有可能被腐蚀。

产品使用说明书

【生产日期】：见标签

【有效期】：5年

【贮存方式】：应储存在阴凉、清洁、干燥、通风的室内。

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】：川蓉械备20150015号

【生产备案凭证编号】：川蓉食药监械生产备20170006号

【备案人/生产企业/售后服务单位】：成都市萨尼医疗器械有限公司

【备案人住所/生产企业住所】：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞四路408号

【生产地址】：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞四路408号1栋1楼108室、3栋

【联系方式】：电话：028-83361652 传真：028-83361651

邮编：610207

邮箱：sc@sanimedical.cn

网址：<http://www.medicalsani.com>

PD-PM-249 Rev.A1(2022.06)

拔髓针

SHORT BARBED BROACHES

【适用范围】：用于牙髓拔除。

【禁忌症】：对本产品过敏者禁止使用。

【使用方法】：根据其预期用途，选择最合适的型号，并将其用于牙髓拔除。

【注意事项】：

- 1、为防止感染，每次使用前请先对产品进行灭菌，确保灭菌完成后方可使用。灭菌方法：压力蒸汽灭菌，灭菌温度：134℃，最短灭菌时间:3min。
- 2、根据不同情况选择最合适的型号，并遵循一般方法。
- 3、使用前，确保口腔外的器械无变形、划痕和裂纹。
- 4、如果产品头部较细、较长或较大，则有可能断裂或扭曲。因此，一定要避免使用不合理的角度和过大的压力。
- 5、佩戴橡皮障等，避免意外误吞和掉落。
- 6、除上述所列用途外，请勿将本仪器用于任何用途。
- 7、仅供牙科医生使用。
- 8、本产品处置时应作为医疗废物处理。
- 9、如果产品损坏或被污染，应进行处理。
- 10、使用后，用医用清洁剂和毛刷清洗，然后冲洗掉附着的体液和人体组织等异物。
- 11、超声波清洗机清洗时，请将产品放置在支架上，以避免切割部分的老化。
- 12、使用本产品时要特别小心，避免因其拥有锋利的边缘部分而刺伤手指。
- 13、本品如果长期浸泡在NaClO、EDTA等溶剂中，有可能被腐蚀。



134℃蒸汽灭菌



未灭菌



SANI

成都市萨尼医疗器械有限公司

成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞四路408号1栋1楼108室、3栋



制造商



批次代码



制造日期



有效期

